

I. Objet

Dans le cadre d'une situation dégradée et pour pallier à la pénurie de masque de soins, un modèle de création de masque de soins en textile est proposé pour :

- Permettre de se protéger
- Continuer son activité professionnelle
- Permettre le maintien de l'activité de l'établissement et la prise en charge des patients

II. Secteurs et professionnels concernés

Tous les professionnels du CHUGA :

- Des services de soins ne prenant pas en charge de patients Covid-19*
- Des services supports

* les services prenant en charge les patients Covid-19 sont :

- Médecine infectieuse
- Secteurs de réanimation
- Pneumologie
- Les services de médecine interne (3^{ème} A, B et C)



III. Fabrication et entretien du masque de soins textile

Matériel nécessaire pour la réalisation :

- Chutes de coton (environ 20 cm) pour l'extérieur et la doublure
- Molleton fin, polaire fine, ...
- Elastique souple



Le masque de soin est composé de 2 couches de tissus en coton et 1 couche de molleton disposée entre les 2 couches.

Patron en annexe


Entretien du masque :

- Celui-ci est à la charge du professionnel
- Le laver **quotidiennement** à son domicile à 30°C avec du détergent classique

IV. Etapes de fabrication

1- Découper le patron (annexe)
2- Découper les pièces de tissus en coton nécessaire (voir patron) : nous obtenons 4 pièces de tissus
3- Découper le molleton (voir patron) : nous obtenons 2 pièces de molleton
4- Couper environ 2 élastiques de 30 cm pour le grand modèle (adapter la longueur à la taille souhaitée)
5- Assembler les 2 pièces de tissu extérieur « endroit contre endroit » partie arrondie
6- Faire le même assemblage pour les 2 pièces tissu doublure
7- Assembler les 2 pièces de tissus obtenues « endroit contre endroit » en insérant les 2 pièces de molleton
Coudre uniquement en haut et en bas : ne pas coudre les petits côtés
8- Retourner l'ensemble sur l'endroit
9- Surpiquer la couture centrale (verticale)
10- Surpiquer le haut et le bas à quelques millimètres du bord
11- Replier les petits côtés (2 fois 1 cm) - repasser
12- Piquer à quelques millimètres du pli pour créer une coulisse
13- Faire glisser le nœud dans la coulisse pour le confort



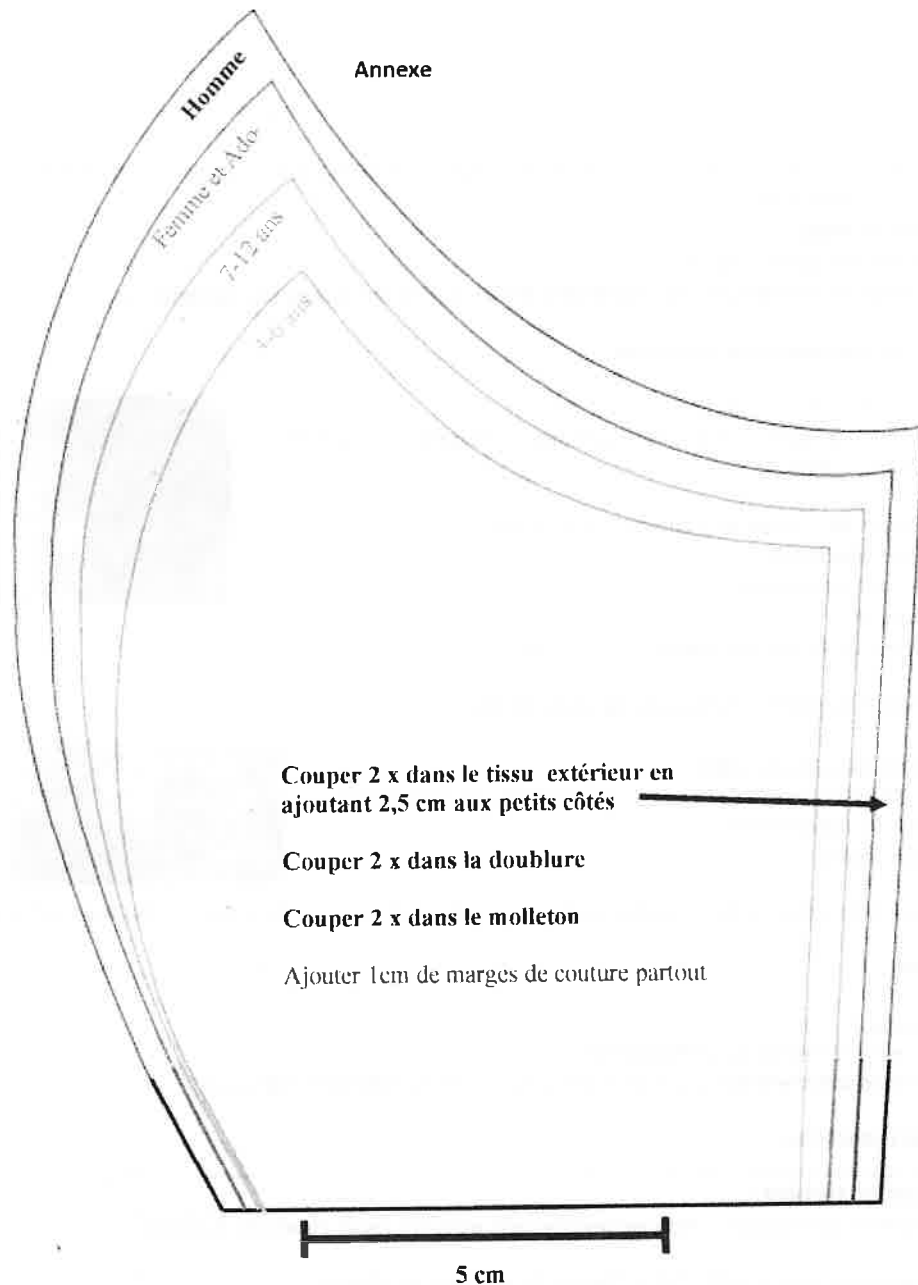

Mesurer ce segment avant de découper le patron

Edition Spéciale Confinement

MOBILISONS-NOUS POUR FABRIQUER DES MASQUES !

Dans le cadre de la propagation du virus Covid-19, un des éléments le plus marquant, est la pénurie de masques. Il est indispensable à ce jour de préserver le personnel soignant et l'environnement des personnes malades. Le CHU de Grenoble a présenté un prototype de masque fait maison, avec les différentes étapes de fabrication, le patron et les matières à utiliser. Nous vous proposons de participer à une chaîne de solidarité. **Même si ces masques rendent service, ils n'auront jamais la même efficacité que les masques FFP2. De la même manière, ces masques textiles ne sauraient remplacer les gestes barrières, ni se substituer aux mesures de confinement.** Les masques fabriqués, seront déposés dans la boîte-aux-lettres située au **9 Route du Pont du Dognon à Saint Martin Terressus** ou au magasin d'alimentation **Proxi à Saint-Priest-Taurion**. Ils seront ensuite récupérés et acheminés à la blanchisserie du CHU par une infirmière pour y être désinfectés et distribués aux soignants. Après utilisation, ils sont nettoyés/désinfectés et partent pour un nouveau tour tant qu'ils sont en bon état. Si vous avez des questions, vous pouvez appeler le 06.49.09.12.52. Si vous connaissez des personnes susceptibles de se mobiliser dans cette chaîne n'hésitez pas à faire passer le message. Vous pouvez utiliser le tissu de chemises en coton à recycler, du molleton de sweat à recycler.